

Segurança máxima
para suas facetas



VENEER ME

Graças a veneerME, você poderá não apenas transportar, mas também manipular suas facetas em porcelana hiper delicadas em totais condições de segurança!



Smile Line ☺
made in switzerland



i create... we create



O sticky-pad em poliuretano

A base do veneerME é recoberta por um disco em gel poliuretano colante.

As facetas são depositadas sobre ele, pela superfície vestibular e aderem naturalmente. Todo o processo de preparação da parte interna da faceta (ataque ácido, silanização) pode ser realizado nesta posição, sem medo de que a faceta escorregue ou caia no chão. O material é resistente e pode ser reutilizado várias vezes. Também é facilmente substituível caso venha a se deteriorar.

A moldura de membrana de segurança

Com as facetas já posicionadas, a moldura de membrana é presa à base do veneerME para uma fixação ainda maior. A membrana extrafina em nylon se adapta delicadamente ao formato da faceta, contribuindo para a sua estabilidade. Resta apenas fechar a caixa e seu trabalho está pronto para ser entregue. O moldura de membrana pode ser substituída – se necessário – após várias utilizações.

Enorme vantagem : a membrana é permeável ! Em outras palavras, o profissional pode continuar com os procedimentos de enxágue e secagem depois de reposicionar a moldura de membrana sobre a base. Deste modo, pode trabalhar nas melhores condições de segurança possíveis.



Descrição	Artigo no.
veneerME, sortimento com 3 unidades completas, 3 discos de poliuretano de reposição e 3 molduras de membrana de reposição	2600
veneerME, discos de poliuretano de reposição (10 pcs)	2610
veneerME, molduras de membrana de reposição (10 pcs)	2620



Desde 1977

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 / (11) 5542.5855
vendas@labordental.com.br / labordental.com.br

Smile Line ☺
made in switzerland

Smile Line SA
PO Box 229
CH-2610 St-Imier · Switzerland
mail@smileline.ch
www.smileline.ch